

For a beautiful smile!



1回目	診療日 年 月 日			
	状況	コメント	目標	
4時				
5時				
6時				
7時				
8時				
9時				
10時				
11時				
12時				
13時				
14時				
15時				
16時				
17時				
18時				
19時				
20時				
21時				
22時				
23時				
24時				
1時				
2時				
3時				

2回目	診療日 年 月 日			
	状況	コメント	目標	
4時				
5時				
6時				
7時				
8時				
9時				
10時				
11時				
12時				
13時				
14時				
15時				
16時				
17時				
18時				
19時				
20時				
21時				
22時				
23時				
24時				
1時				
2時				
3時				

装着時間応援シート ～アライナーの装着時間が不足している患者様へのアプローチ～

※装着時間の不足は治療が予定通り進まない原因になります。患者様とコミュニケーションを取りながらアライナーの装着状況を客観的に把握し、より長く装着できるよう、当シートを活用して患者様を応援しましょう!

※作成後は、当シートを医院様にて保管いただくか、もしくはコピーを取り点線より上部を切り離して患者様にお渡しするなどの方法でご活用ください。

【作成手順】

1. 患者様に装着時間が足りなかった日の行動パターンを思い出してもらいましょう。
2. アライナーを外していた時間をお聞きし「状況」欄に色を塗ります。(例:お昼は何時から何時まで外していましたか?)
3. 装着できない理由や困っている事などをお聞きし、コメント欄に記入します。
4. どの時間の行動をどう変えれば装着できるようになるかを考え、患者様に提案しましょう。患者様の意向もお聞きしながら、コメント欄にその行動を書き足します。
5. アライナーを外している目標の時間を再確認し「目標」欄に色を塗ります。

※本資料およびインビザライン治療に関するお問い合わせは、ご担当のドクターに直接ご相談ください。

アライン・テクノロジー・ジャパン株式会社

INVISALIGN、ITERO、CLINCHECKはAlign Technology, Inc.またはその子会社または関連会社の商標および/またはサービスマークであり、米国および/またはその他の国において登録されている可能性があります。

MKT-0003800 Rev B